


GEBRAUCHSANWEISUNG KIMBERLY-CLARK® TECNOL®-RESPIRATOREN



ZUM ÖFFNEN DER MASKE DIE ZWEI SEITENRÄNDER AUSEINANDERFÜHREN. DEN NASENBÜGEL VORBIEGEN. ANSCHLIESSEND DIE MASKE AN DEN ZWEI KOPFBÄNDERN HALTEN.

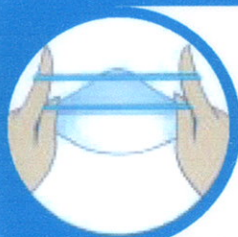

DIE ZWEI KOPFBÄNDER MIT DEN ZEIGEFINGERN UND DAUMEN VONEINANDER TRENNEN.



MASKE UNTER DEM KINN ANLEGEN.



BEIDE KOPFBÄNDER ÜBER DEN KOPF ZIEHEN.



DAS UNTERE KOPFBAND AM NACKEN UND DAS OBERE KOPFBAND AM HINTERKOPF PLATZIEREN.



DEN NASENBÜGEL ENDGÜLTIG IN POSITION BIEGEN, UND DIE MASKE DER GESICHTSKONTUR ANPASSEN UM EINE SICHERE UND DICHTER PASSFORM ZU GEWÄHRLEISTEN.